

Uma empresa que acredita no avanço e na competência dos profissionais médicos e aposta na continuidade do grande desenvolvimento da medicina. Uma empresa que investe na elaboração de produtos com os padrões de qualidade exigidos pelos principais centros médicos.

Segurança para o médico.
Conforto para o paciente.

Para
Flebo Extrator Descartável
Helmeyster

Segurança para o médico.
Conforto para o paciente.

Para
Flebo Extrator Descartável
Helmeyster

Segurança para o médico.
Conforto para o paciente.

Para
Flebo Extrator Descartável
Helmeyster

Para
Cirurgia de Varizes

O Flebo Extrator Descartável HELMEYSTER é indicado para cirurgias de varizes, mais especificamente para a retirada da veia safena, possibilitando ao médico utilizar-se de um produto totalmente estéril, prático para o manuseio e desenvolvido com materiais de alta qualidade como nylon P.A.6 e poliamida. Um produto totalmente descartável que garante a segurança de uma cirurgia tranquila com um menor risco de contaminação.



- > Introduza o cabo por uma das pontas da veia.
- > A oliva (uma das três) deverá ser colocada após inserido o cabo.
- > Introduza o cabo na abertura e deixe na posição.
- > Puxe o cabo para dentro da oliva até encaixar.

Observações:

- A flexibilidade plástica favorece a sua utilização.
- Muito mais conforto para o paciente e segurança para o médico
- Deve ser Destruído após o uso.

O produto é composto por:

- Um cabo de nylon P.A.6 atóxico com 120 cm de comprimento.
- Um fio guia (100% poliamida) com 120 cm de comprimento.
- Uma oliva com 7,0 mm de diâmetro.
- Uma oliva com 9,0 mm de diâmetro.
- Uma oliva com 11,0 mm de diâmetro.

O produto é esterelizado em Óxido de Etileno.